

# Modell: SJ7899

## Partikelfilter-Halbmaske

### Anwendung:

Die FFP2-Maske schützt vor festen und flüssigen Aerosolen nach EN 149:2001 + A1:2009. NR: zum einmaligen Gebrauch, nach Gebrauch entsorgen. Vorschriften und Gesetze zum Einsatz persönlicher Schutzausrüstung berücksichtigen. Kontrollen vor Gebrauch siehe Piktogramme auf der Verpackung. Funktionsprüfung: Maske nur einsetzen, wenn sie nicht beschädigt ist.

Dichtheitskontrolle durchführen: Maske mit beiden Händen umschließen und kräftig ausatmen. Bei Luftaustritt Sitz der Maske und der Bänder überprüfen, wenn nötig das Band verkürzen. Achtung: Bartbehaarung kann Dichtheitskontrolle beeinträchtigen.

### Warnhinweise:

Die Handhabung der Maske muss bekannt sein. Schützt nicht vor Gasen, Dämpfen, Lösungsmitteln oder bei weniger als 19,5% Sauerstoff. Unbelüftete Behälter, enge Räume und Schächte nicht mit Filtergeräten betreten.

Nicht verwenden gegen: unbekannte Gefahrstoffe, Konzentrationen und wenn Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit sind. Bei Beschädigung und / oder stark ansteigendem Atemwiderstand die Maske auswechseln.

Keine Veränderungen und Reparaturen an der Maske durchführen. Falscher Einsatz oder Nichtbeachtung der Warnhinweise vermindern die Schutzwirkung und können zu Erkrankungen oder dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Lagerung siehe Piktogramme.

### Weitere Hinweise:

EU-Konformitätserklärung unter [www.centurion-vertrieb.de/medicare/#ffp2-konformitaet](http://www.centurion-vertrieb.de/medicare/#ffp2-konformitaet)



1. Maximale relative Luftfeuchtigkeit (RH) während der Lagerung
2. Lagertemperatur:
3. Lagerfähig bis 11/2022
4. Gebrauchsanleitung lesen!

### Jinhua City Shengjie Labor Products Factory

Shankoufeng, Chisong Town,  
Jingdong District, Jinhua,  
Zhejiang, China  
Phone: +86 579 209 7111  
E-Mail: [lujiseven@sina.com](mailto:lujiseven@sina.com)  
[www.sj-mask.com](http://www.sj-mask.com)



**Vertrieb durch:**  
**CENTURION**  
**Vertriebs GmbH**  
Phoenixallee 11  
31137 Hildesheim  
Germany